

Brugsanvisning

ConnectLine
Microphone



oticon
life-changing technology

Introduktion

Denne brugsanvisning beskriver, hvordan du bruger og vedligeholder din nye mikrofon. Læs brugsanvisningen grundigt, inkl. afsnittet **Advarsler**. Dette vil hjælpe dig med at få mest mulig gavn af mikrofonen.

Kontakt din hørespecialist, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af mikrofonen.

For at gøre det lettere for dig indeholder denne brugsanvisning navigationslinjen nedenfor, så du kan navigere nemt gennem de forskellige afsnit.

| **Om** | [Opstart](#) | [Daglig brug](#) | [Advarsler](#) | [Yderligere info](#) |

Tilsluttet brug

Tilsluttet brug	ConnectLine Microphone er beregnet til at blive brugt sammen med Oticons trådløse høreapparater og Streamer Pro. ConnectLine Microphone er beregnet til brug af en person, der taler til en bruger af Oticon høreapparater, for at brugeren bedre kan høre den, der taler. ConnectLine Microphone sender tale fra den talende via Streamer Pro til høreapparaterne.
Indikationer for brug	Ingen indikationer for brug.
Tilsluttede brugere	Voksne og børn over 36 måneder.
Brugsmiljø	Indendørs / udendørs.
Kontraindikationer	Brugere af aktive implantater skal være ekstra opmærksomme, når de bruger enheden. Find mere information i afsnittet Advarsler .
Kliniske fordele	Se høreapparatets kliniske fordele.

Indholdsfortegnelse

Om

Pakkens indhold	6
Oversigt over mikrofonen	7
Sådan fungerer mikrofonen	8
Opladning/strømindikator	10

Opstart

Parring	12
---------	----

Daglig brug

Start/tænd/genoptag lyd fra mikrofonen	16
Sæt lyden på pause	18
Genoptag lyd via Streamer Pro	20
Kontrollér lyden	22
Sluk mikrofonen	22
Vedligeholdelse af mikrofonen	23

Advarsler

Generelle advarsler	24
Brugsbetingelser	27

Yderligere info

International garanti	28
Garantibevis	29
Teknisk information	30

Pakkens indhold

Æsken indeholder følgende elementer:

Connectline Microphone



Pose til opbevaring



Halsnor



Strømforsyning (oplader)



Denne brugsanvisning



Overzicht over mikrofonen


Statusindikator (orange)

Mikrofonindgang (stemme)

Strømindikator (grøn)

TÆND/SLUK-knap


Mikrofonindgang
Må ikke tildækkes

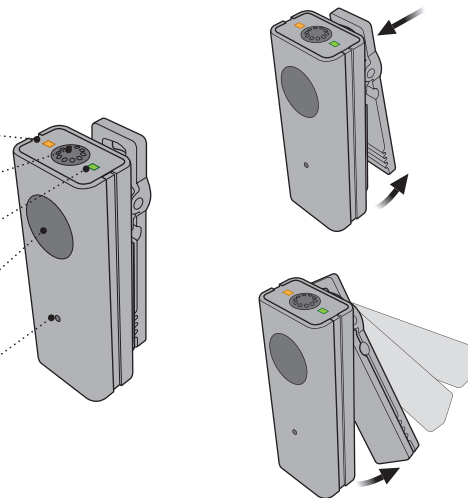

**Strømforsyningen vil være forskellig fra land til land.*

Sådan fungerer mikrofonen

Mikrofonen sender det, der bliver sagt direkte til høreapparatbrugeren via Streameren.

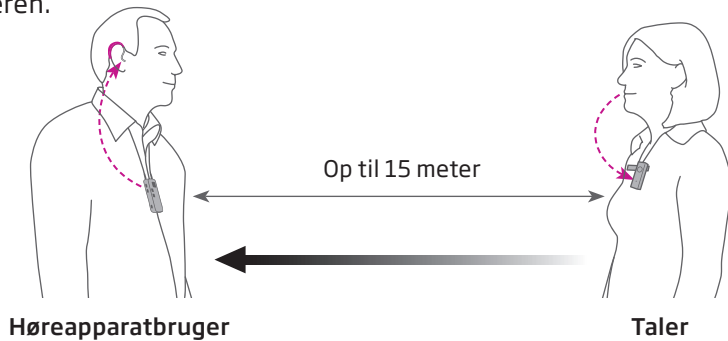


Bemærk
En mikrofon vil kun fungere med én Streamer ad gangen.

VIGTIGT

Der henvises til dine høreapparaters "Brugsanvisning" for yderligere oplysninger om din specifikke hørreløsnings funktioner.

Mikrofonen skal pege mod den talendes mund inden for en afstand på 10 til 20 cm.

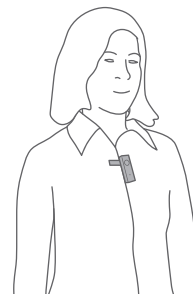

Brug af clips




Brug af halssnor



Forkert brug

Opladning/strømindikator

Mikrofonen oplades ved at tilslutte strømforingskablet til mini-usb-stikket i bunden af mikrofonen.

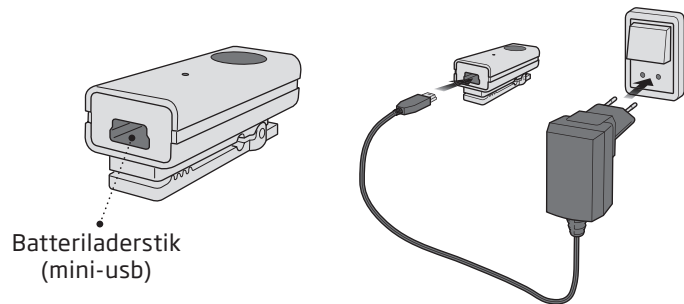


VIGTIGT

Ved opladning af mikrofonen skal du bruge den medfølgende originale strømforing 5,0 V / 1 A, CE- og sikkerhedsmærket.




Lyser konstant rødt

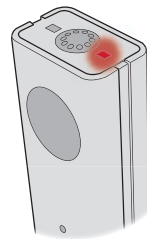

Lavt batteriniveau.
Maks. 20 minutter
brugstid tilbage.

Opladning

Lyser konstant grønt

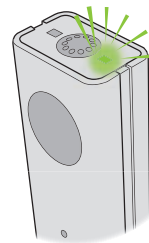

Fuldt opladet efter
ca. 1,5 timer og kan
bruges i 5 timer på en
fuld opladning.

VIGTIGT

Under opladning vil ladeindikatorerne lyse som beskrevet i denne brugsanvisning. Hvis ladeindikatorerne ikke lyser som beskrevet, skal enheden frakobles opladeren, og du skal kontakte din hørespecialist.

Parring (kun nødvendigt én gang)

1. Streamer Pro i parringstilstand



Hold TÆND/SLUK-knappen øverst inde.

6 sek.



Hold den inde, indtil det blå lys blinker.

2. Mikrofon i parringstilstand

6 sek.




Tryk på TÆND/SLUK-knappen øverst på mikrofonen i 6 sekunder, indtil det orange lys blinker hurtigt.

←



Orange lys blinker.

3. Mikrofon parret

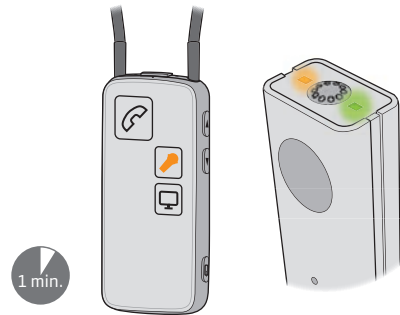

Vent op til 1 minut, indtil både Streamer Pro og mikrofonen viser et orange lys.


Start/tænd/genoptag lyd fra mikrofonen

1. Sørg for, at Streamer Pro er tændt



Hold TÆND/SLUK-knappen øverst inde, indtil alle lys foran og øverst blinker.

2. Tænd for mikrofonen

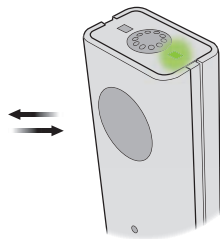

Tryk kort på TÆND/SLUK-knappen.

3. Lyd fra mikrofonen til Streamer Pro




Orange lys blinker langsomt.




Orange lys på Streamer Pro er tændt, og orange lys på mikrofonen er tændt.

Sæt lyden på pause


Sæt lyden på pause via mikrofonen

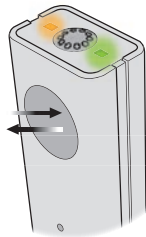

Tryk kort på TÆND/
SLUK-knappen.

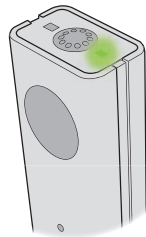


Orange lys på
mikrofonen slukkes.

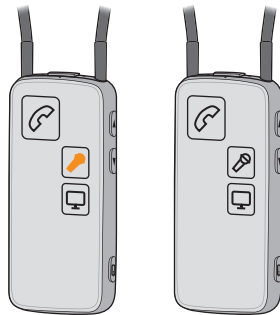

Orange lys på Streamer Pro slukkes.


Sæt lyden på pause via Streamer Pro

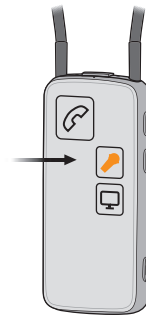

Tryk kort på
mikrofonknappen
på Streamer Pro.




Orange lys på
Streamer Pro
slukkes.

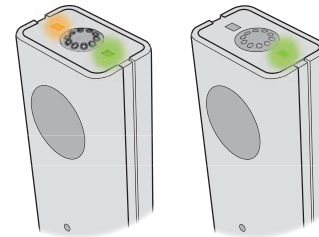

Orange lys på mikrofonen slukkes.


Genoptag lyd via Streamer Pro

Mikrofonen skal være tændt

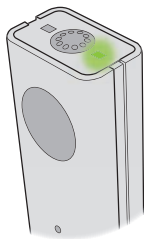

Konstant grønt lys.

Genoptag lyd via Streamer Pro

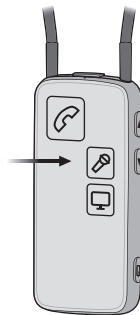

Tryk kort på mikrofonknappen på Streamer Pro.




Orange lys på Streamer Pro blinker langsomt.

Lyd fra mikrofonen til Streamer Pro




Efter 2 sekunder tændes orange lys på mikrofonen.

Kontrollér lyden

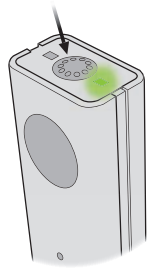

Slå let øverst på mikrofonen for at kontrollere, om lyden høres i høreapparaterne.

Sluk mikrofonen

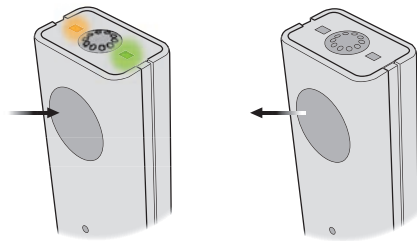

Hold inde i to sekunder, indtil det grønne lys slukkes.

Vedligeholdelse af mikrofonen

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre mikrofonen.

VIGTIGT

Mikrofonen må aldrig vaskes, nedsænkes i vand eller andre væsker.

Generelle advarsler

Af hensyn til din personlige sikkerhed og for at sikre korrekt brug bør du sætte dig grundigt ind i følgende generelle advarsler, før du bruger mikrofonen. Kontakt din hørespecialist, hvis du oplever uventede funktioner eller alvorlige hændelser med mikrofonen under brug eller som følge af brug. Din hørespecialist vil hjælpe dig med at løse problemerne og indberette dem til producenten og/eller de nationale myndigheder, hvis det er relevant.

Kvælningsfare og risiko for at synke batterier eller andre små dele

Mikrofonen, dens komponenter og batterier skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv.

Søg straks læge, hvis nogen kommer til at sluge et batteri, et høreapparat, eller en lille del.

Brug om bord på fly

Mikrofonen bruger Bluetooth. Mikrofonen bør ikke bruges om bord på fly, medmindre det specifikt er tilladt af flypersonalet.

Aktive implantater

Mikrofonen er blevet grundigt afprøvet og karakteriseret i overensstemmelse med menneskers helbred i henhold til internationale standarder for human eksponering (Specifik absorptionsrate - SAR), elektromagnetisk kraft og spændinger påført menneskekroppen. Eksponeringsværdierne ligger langt under de internationalt accepterede sikkerhedsgrænser for SAR, elektromagnetisk kraft og spændinger påført menneskekroppen og sameksistens med aktive medicinske implantater som pacemaker og hjertedefibrillatorer, der defineres i standarder for menneskers helbred.

Genopladeligt batteri

Forsøg ikke at åbne mikrofonen, da dette kan beskadige batteriet. Forsøg aldrig at udskifte batteriet. Hvis der er behov for udskiftning af batteriet, skal enheden returneres til leverandøren. Servicegarantien bortfalder, hvis der er tegn på forsøg på at åbne batterilåget.

Sikkerheden ved genopladning af batterier med usb-stikket bestemmes af den eksterne signalkilde. Når enheden er tilsluttet eksternt udstyr, der sidder i en stikkontakt, skal dette udstyr overholde IEC62368-1 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Varme og kemikalier

Mikrofonen må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen. Mikrofonen må ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer ovne.

Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, solcreme og myggespray kan ødelægge mikrofonen. Læg altid mikrofonen fra dig, inden du bruger sådanne produkter. Lad produkterne tørre helt, inden du tager den i brug igen.

Brug af halssnor

Hvis halssnoren ved et uheld fanges i noget, mens du har den på, er den konstrueret til at åbne sig. Gør derfor aldrig forsøg på at afkorte eller ændre halssnoren på en uautoriseret måde. Halssnoren bør ikke bruges af børn under 36 måneder.

Interferens

Mikrofonen er blevet grundigt afprøvet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan der forekomme interferens mellem mikrofonen og andre enheder (fx visse mobiltelefoner, walkie-talkier, butiksalarmsystemer og andre trådløse enheder). Hvis du oplever interferens, skal du fjerne mikrofonen lidt fra den forstyrrende kilde.

Forbindelse til eksternt udstyr

Sikkerheden ved brug af høreapparatet, når det er forbundet med eksternt udstyr via et usb-kabel og/eller direkte bestemmes af den eksterne lydkilde. Når enheden er tilsluttet eksternt udstyr, der sidder i en stikkontakt, skal dette udstyr overholde IEC-62368-1 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Generelle advarsler

Eksplodingsrisiko

Mikrofonen er sikker at bruge under normale brugsbetingelser. Mikrofonen er dog ikke afprøvet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplodingsrisiko.

Derfor må mikrofonen ikke anvendes i omgivelser med fare for eksplosioner fx miner, iltrige miljøer eller områder, hvor brændbare anæstetika håndteres.

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi og operation

Læg mikrofonen fra dig inden røntgen-, CT-, MR-, PET-scanninger, elektroterapi eller operation osv., da den kan tage skade af kraftig elektromagnetisk stråling.

Opladning

For at forebygge potentiel skade på batteriet under opbevaring, skal du oplade mikrofonen hver 6. måned.

Brug af tredjepartstilbehør

Brug kun tilbehør, transducere eller kabler leveret af producenten. Inkompatibelt tilbehør kan resultere i nedsat elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i din enhed.

Mulige bivirkninger

I yderst sjældne tilfælde kan materialer anvendt i mikrofonen, som ellers ikke er allergene, irritere huden eller medføre andre bivirkninger.

Søg læge, hvis du oplever sådanne bivirkninger.

Brug i trafikken

Brug af mikrofonen kan distrahere dig. Vær opmærksom på dine omgivelser, når du bruger mikrofonen. Der henvises til de nationale færdselsregler vedrørende brugen af kommunikationsudstyr i trafikken.

Brugsbetingelser

Driftsforhold	Temperatur: +5 °C til +40 °C Luftfugtighed: 15 % - 93 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa
Transport- og opbevaringsforhold	Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring: Temperatur: -20 °C til +60 °C Luftfugtighed: 15 % - 93 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

International garanti

Din enhed har fra producentens side en begrænset international produktgaranti på 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl i selve enheden, men ikke i tilbehør som fx batterier, ledninger, strømforsyninger osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig/ukorrekt håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af en uautoriseret tredjepart, ætsning, skade som følge af fremmedlegemer i enheden eller forkert indstilling af enheden. Under denne garanti vælger fabrikanten efter eget skøn, om den skal repareres eller udskiftes med en tilsvarende model. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Din hørespecialist kan have udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.

Service

Medbring din enhed til din hørespecialist, som har mulighed for at løse mindre problemer. Din hørespecialist kan hjælpe dig med at få garantiservice fra producenten. Din hørespecialist kan opkræve et gebyr for sine tjenester.

Oticons servicecenter:

Oticon Denmark A/S
Sundbyvej 19
7752 Snedsted

Garantibevis

Brugerens navn: _____

Hørespecialist: _____

Hørespecialistens adresse: _____

Hørespecialistens telefon: _____

Købs-/udleveringsdato: _____

Model: _____ Serienr.: _____

Teknisk information

Modelnavn	Mic-110
-----------	---------

Enheden indeholder en radiosender, der anvender en teknologi kaldet frequency hopping i ISM-båndet ved 2,4 GHz.

Senderens spidseffekt er mindre end 6 dBm, og antennen er en lille PCB-antenne med et retvinklet gain på mindre end 2 dBi (dB over en isotropisk eller omnidirektional antenne).

Emissionseffekten fra denne enhed ligger under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er denne enheds stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra fx hårtørrer, elektriske barbermaskiner osv.

Denne enhed overholder FCC- og IC RF-eksponeringsgrænserne, når den betjenes, mens den bæres, og er blevet testet, mens den var i berøring med en menneskekrop. Enheden må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller sendere uanset art.

Denne enhed opfylder internationale standarder vedrørende radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og human eksponering.

På grund af den begrænsede plads på selve enheden findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

USA og Canada

Denne enhed er certificeret i henhold til.:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Bemærk

Enheden opfylder afsnit 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standarder.

Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, heriblandt interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Bemærk

Ændringer eller justeringer af enheden, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan medføre, at garantien bortfalder.

Producenten erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 2014/53/EU.

Denne medicinske enhed opfylder regulativ om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.

Overensstemmelseserklæring kan indhentes hos producenten.



Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Beskrivelse af symboler anvendt i denne brugsanvisning



Advarsler

Tekst markeret med et advarselssymbol skal læses før produktet tages i brug.



Producent

Enheden produceres af den producent, hvis navn og adresse er angivet ved siden af symbolet. Angiver producenten af det medicinske udstyr, som defineret i EU-regulativerne 2017/745 og 2017/746.



CE-mærke

Enheden opfylder alle påkrævede EU-regulativer og -direktiver.



Elektronisk affald (WEEE)

Genbrug af høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale bestemmelser. Høreapparatbrugere kan også returnere deres elektroniske affald til deres hørespecialist til bortskaffelse. Elektronisk udstyr dækket af direktiv 2012/19/EU om affald fra elektronisk udstyr (WEEE).



Symbol, der indikerer overholdelse af lovgivning (RCM - Regulatory Compliance Mark)

Enheden opfylder kravene om elektrisk sikkerhed samt EMC- og radiospektrumkravene for enheder leveret til markedet i Australien eller New Zealand.



Dobbelt isolering

Angiver at produktets strømforsyning er dobbeltisoleret. Dette betyder en meget lav risiko for enkeltfejl, dvs. enkeltfejl kan ikke forekomme.



Indendørs brug

Angiver, at produkter er beregnet til indendørs brug.



Singapore IMDA-mærkat

Angiver, at enheden lever op til standarderne og specifikationerne, der offentliggøres af Info-Communications Media Development Authority (IMDA) og er kompatible med de offentlige telekommunikationsnetværk i Singapore og forårsager ikke radiofrekvensinterferens på andre godkendte radiokommunikationsnetværk.

Beskrivelse af symbolerne, der anvendes på den lovbestemte emballagelabel



Holdes tør

Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.



Forsigtighedssymbol

Se brugsanvisningen vedr. advarsler og forsigtighedsregler.



Katalognummer

Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.



Serienummer

Angiver producentens serienummer, så det specifikke medicinske udstyr kan identificeres.



Medicinsk udstyr

Enheden er medicinsk udstyr.



Li-ion

Batterigenbrugssymbol

Li-ion-batterigenbrugssymbol.

5,0V 200mA

Strømforsyning - outlet

Angiver den styrke, hvormed strøm sendes fra strømforsyningen til din elektriske enhed.



Japan TELEC-symbol

Angiver mærke for certificeret radioudstyr.

219893DK / 2020.04.14 / v1

219893DK / 2020.04.14 / v1



oticon
life-changing **technology**