

Oticon ♦ Hit

BRUGSANVISNING HIT PRO



RITE

oticon
PEOPLE FIRST

Tillykke

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed og med minimum af vedligeholdelse.

Denne brugsanvisning vil hjælpe dig til at opleve de mange fordele ved høreapparater og sikre, at du får det fulde udbytte af dem.

Indhold

RITE-apparat	5
Udskiftning af batteri	6
Tænd og sluk	8
Indikation af venstre/højre høreapparat	9
Sådan tager du høreapparaterne på	10
Trykknop	11
Programmer (option)	13
Volumenkontrol (option)	15
Stand-by (option)	16
Børnesikret batteriskuffe (option)	18
Telespole (option)	19
Autotelefon (option)	20
DAI (Direkte Audio Indgang)	22
Daglig vedligeholdelse af dine høreapparater	24
Daglig vedligeholdelse – Micro øreprop (option)	27
Udskiftning af WaxStop voksfilter	28
Tipper – Daglig vedligeholdelse	30
Udskiftning af tip	31





Undgå varme, fugt og kemikalier	33
Syv nemme trin til bedre hørelse	34
Almindelige problemer og løsningsforslag	40
Advarsler	Gule sider


VIGTIGT!

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at bruge dine høreapparater. Den indeholder forklaringer og vigtige informationer om brugen og vedligeholdelsen af dine høreapparater og batterier.

RITE-apparat

Din tip/øreprop:

-  Micro øreprop / Tradionel øreprop
 -  Plus tip
 -  Power tip
- Åben tip:
-  6mm
 -  8mm
 -  10mm

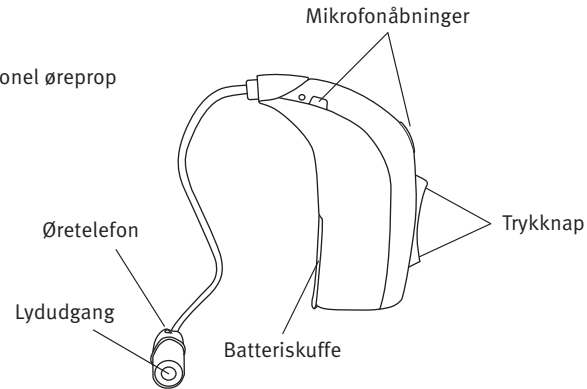

Udskiftning af batteri



Dit høreapparat bruger batteristørrelse **312**.

Et opbrugt batteri bør fjernes omgående og afleveres der, hvor du normalt afleverer batterier.

Når batteriet er ved at være opbrugt, høres 2 bip. Dette forvarsel starter, når batteriet kun har nogle få timer tilbage. Forvarslet vil blive gentaget med rimelige mellemrum for at indikere, at det er tid til at udskifte batteriet.

Hvis batteriet løber ud, slukkes apparatet. Når det sker, høres 4 bip for at indikere, at apparatet ikke længere er tændt.


Det betyder ikke, at der er noget galt med høreapparatet.

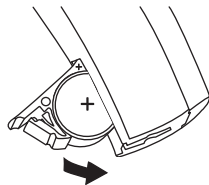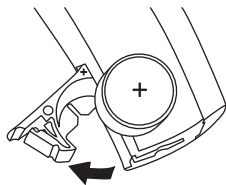

Følg vejledningen nedenfor, når du udskifter batteriet:

- Åbn batteriskuffen med en fingernegl og fjern det gamle batteri. Det gamle batteri kan fjernes ved hjælp af magneten i den ene ende af Multiværktøjet.
- Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri.
- Isæt det nye batteri ved hjælp af magneten på Multiværktøjet, så + mærket på batteriet vender samme vej som + mærket i batteriskuffen. Luk batteriskuffen.

Eventuel fugt på batteriet skal tørres af før brug. Når du skifter batteri, kan det tage et par sekunder, inden batteriet virker med fuld effekt.

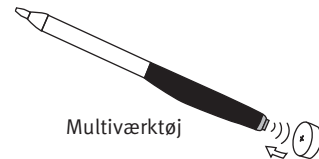

Tænd og sluk

For at **TÆNDE** for høreapparatet skal du lukke batteriskuffen helt med batteriet isat.


Når batteriskuffen lukkes, vil apparatet starte op og afspille en jingle. Dette betyder, at batteriet virker, og at apparatet fungerer.

For at **SLUKKE** høreapparat skal du åbne batteriskuffen en anelse, indtil du føler et klik.

For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på.

VIGTIGT!

Lad batteriskuffen stå helt åben, så høreapparatet kan lufttørre, når du ikke bruger det, specielt om natten!

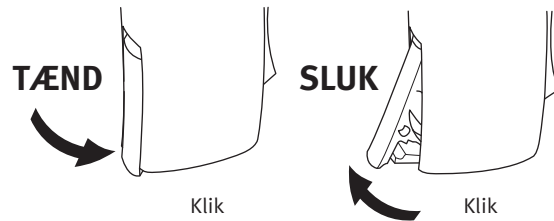


Indikation af venstre/højre høreapparat

Høreapparater er tilpasset individuelt på hvert øre, hvilket betyder, at hvis du har to apparater, så er dit venstre høreapparat sandsynligvis programmeret anderledes end det højre. Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem venstre og højre høreapparat.

For nemt at kunne identificere, om der er tale om høreapparatet til venstre eller højre øre, kan batteriskuffen forsynes med farvemarkering.

En blå prik angiver VENSTRE høreapparat.
En rød prik angiver HØJRE høreapparat.

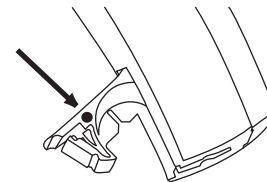


Sådan tager du høreapparaterne på

Sæt først øretelefonen med monteret øreprop/tip i øregangen og placér derefter apparatet bag øret.

Hvis apparatet er leveret med Micro øreprop, skal du tjekke, at den farvede prik (blå eller rød) på proppen vender mod høreapparatet (opad), så den placeres korrekt i øregangen.

Kontrollér, at øreproppen er placeret, så slangen følger hudens profil.


Hvis dit høreapparat har slangestyr, placeres det i øret som vist på tegningerne 3 og 4, så det følger ørets form.

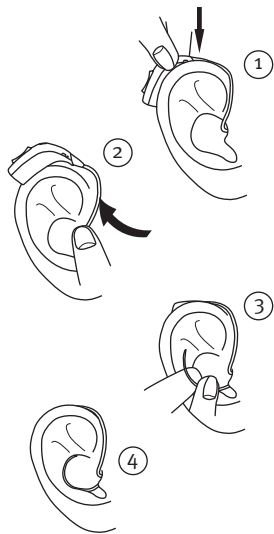

Trykknop

Dine høreapparater har en ergonomisk designet trykknop, så du kan justere lydstyrken og skifte mellem de forskellige programmer.

Du kan aktivere trykknappen ved at trykke på enten den øvre del (OP) eller nedre del (NED).

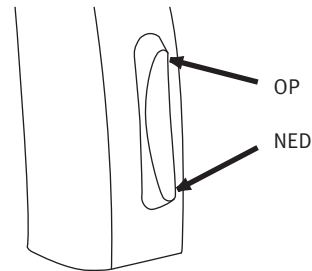

Trykknappen på dit høreapparat kan programmeres til 1 af 3 funktioner.

Venstre	Højre	
		Programskift: Tryk kort for at skifte program.
		Styrkekontrol: Tryk kort for at justere lydstyrken.
		Både styrkekontrol og programskift: Tryk kort for at justere lydstyrken og langt (cirka 2 sekunder) for at skifte program.





Udfyldes af din høreapparatilpasser!

Programmer (option)



Dit høreapparat kan have op til 4 forskellige programmer.

Dine høreapparater bipper, når du skifter mellem de forskellige programmer. Antallet af biptoner indikerer, hvilket program du bruger.

	Et bip, når du skifter til program 1
	To bip, når du skifter til program 2
	Tre bip, når du skifter til program 3
	Fire bip, når du skifter til program 4

Tryk øverst på knappen for at gå frem i programlisten fx. fra P1-P2.

Tryk nederst på knappen for at gå tilbage i programlisten fx. fra P3-P2.

Nedenfor kan du se en beskrivelse af de programmer, som findes i dit høreapparat.


Prg. 1: _____

Prg. 2: _____

Prg. 3: _____

Prg. 4: _____

Udfyldes af din høreapparatilpasser.

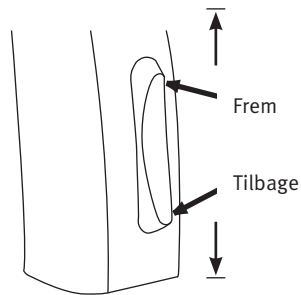

Volumenkontrol (option)



Volumenkontrollen kan aktiveres.

Volumenkontrollen giver dig mulighed for at justere lydstyrken i særlige lyttesituationer til et niveau, du føler behagligt.

Tryk kortvarigt på den øvre del af trykknappen for at **øge volumen**.

Tryk kortvarigt på den nedre del af trykknappen for at **mindske volumen**.

Du vil høre en biptone, når du skruer op eller ned for lydstyrken.

Når høreapparatet tændes, starter det på det foretrukne lydstyrkeniveau.

Når volumenkontrollen justeres til det foretrukne niveau, indikeres det med to korte biptoner.

Stand-by (option)




Hvis du holder trykknappen inde i minimum 3 sekunder, bliver høreapparatet sat på standby.

Tryk kort på knappen for at aktivere høreapparatet igen.

Brug standbyfunktionen, hvis du ønsker at afbryde høreapparatet midlertidigt, i mens du har det på.

Bemærk: du kan trykke enten op eller ned for at sætte høreapparatet på standby.

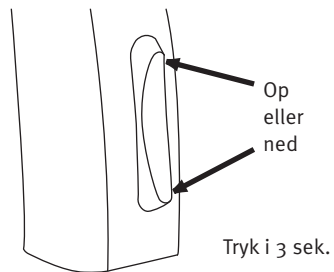

VIGTIGT!

Brug ikke standby-funktionen som sluk-funktion, da høreapparatet i denne indstilling stadig trækker strøm fra batteriet.

Børnesikret batteriskuffe (option)



Den børnesikrede batteriskuffe anbefales kraftigt til små børn og mentalt handicappede.

Instruktion:


For at låse batteriskuffen:

Kontrollér at skuffen er helt lukket. Brug skruetrækkeren på Multiværktøjet til at dreje den børnesikrede skrue til låst position.

For at låse batteriskuffen op:

Brug skruetrækkeren på Multiværktøjet og drej den børnesikrede skrue til åben position. Batteriskuffen kan nu åbnes normalt.

Vigtigt: Tving ikke batteriskuffen til at åbne forbi det normale stop. Isæt batteriet korrekt. Ved at bruge kraft kan batteriskuffen beskadiges og gøre, at børnesikringen ikke længere fungerer optimalt.

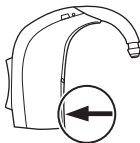

Telespole (option)



Telespolen modtager lyd transmitteret fra en teleslynge. Telespolen bruges ved telefonsamtaler og til teleslyngeanlæg i f.eks. teatret, kirken eller ved forelæsninger.

Du aktiverer telespolen ved hjælp af trykknappen, ligesom når der skiftes mellem programmer. Når telespolen er aktiveret, hører du et antal biptoner svarende til telespoleprogrammet.


Se, hvor telespoleprogrammet er placeret, i afsnittet "Programmer".

Autotelefon (option)

Dit høreapparat kan have en Autotelefon-funktion. Autotelefonen er kun aktiveret, når høreapparatet befinder sig tæt ved en telefon. Et telespoleprogram aktiveres, og du hører et antal biptoner.

Når du afslutter telefonsamtalen, vil høreapparatet automatisk vende tilbage til det foregående program.

Ikke alle telefoner kan aktivere autotelefonen. Telefonen skal have en særlig magnet monteret. Følg venligst den separate vejledning i montering af magneten, som fås hos din høreapparattilpasser.

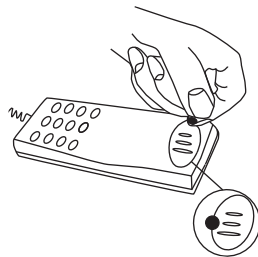

ADVARSEL

Hvis du bruger en autotelefon-magnet:

- Magneten skal holdes uden for rækkevidde af børn og dyr. Søg omgående læge, hvis nogen kommer til at sluge en magnet.
- Hav ikke magneten i brystlommen, og hav den altid min. 30 cm fra aktive implantater. Vi anbefaler, at telefonen med magnet holdes på modsat side, hvis du har en pacemaker eller andet aktivt implantat.
- Hold magneten på min. 30 cm afstand fra kreditkort og andet, som er følsomt over for magnetisme.

DAI (Direkte Audio Indgang)


Hvis dine høreapparater ved hjælp af DAI-sko er tilsluttet til en ekstern lydkilde, fx. mp3 eller håndmikrofon, vil signalerne fra disse kilder blive ført direkte ind i dine høreapparater.

Montering af DAI-sko

Begynd med at åbne batteriskuffen og klik så DAI-skoen på høreapparatet.

Sæt derefter DAI-ledningen i scoen.

Når DAI-skoen er tilsluttet, skifter høreapparatet automatisk til en kombination af et DAI-program og høreapparatets mikrofon.

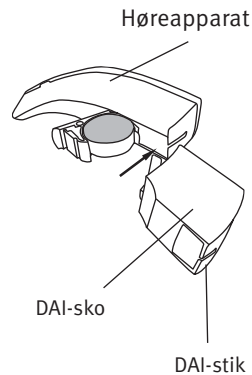

Hvis du kun ønsker DAI-programmet, kan du skifte til næste program ved hjælp af trykknappen.

Så længe DAI-skoene er tilsluttet høreapparaterne, vil to nye programmer automatisk blive placeret efter standardprogrammerne, som din høreapparattilpasser har indstillet.

VIGTIGT!

Når DAI er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat overholde kravene i IEC-60065, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Daglig vedligeholdelse af dine høreapparater

Øregangen producerer ørevoks (cerumen), som kan tilstoppe høreapparatets lydudgang eller ventilationsåbning. For at forhindre, at dette påvirker høreapparatets ydelse, skal du følge anvisningerne i dette afsnit.

Når du rengør høreapparaterne, skal du holde dem over en blød overflade, hvis du skulle tabe dem.


Inden du går i seng:

- Sørg for, at der ikke sidder ørevoks i øreproppens åbninger, da voksen kan forringe apparatets ydeevne.
- Åbn batteriskuffen, så høreapparatet kan lufttørre indvendig.

Rengøring af høreapparatet

Værktøjet indeholder en børste til rengøring af dine høreapparater. Denne skal bruges for at sikre den bedste pleje og ydelse af høreapparaterne.

Multiværktøj

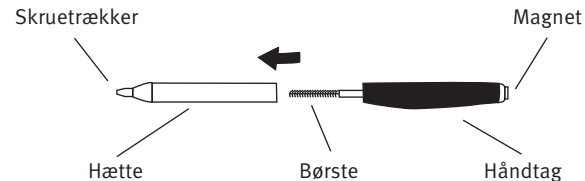


Daglig vedligeholdelse – Micro øreprop (option)

Micro øreproppen bør rengøres regelmæssigt:

- Ventilationsåbningen rengøres ved at trykke børsten gennem hullet og samtidig dreje det en anelse.

Udskift børsten, når det er nødvendigt. Træk håndtaget af og sæt en ny børste i. Tryk børsten ordentlig fast i håndtaget.

Selve høreapparatet og Micro øreproppen må aldrig vaskes eller komme i vand eller andre væsker!

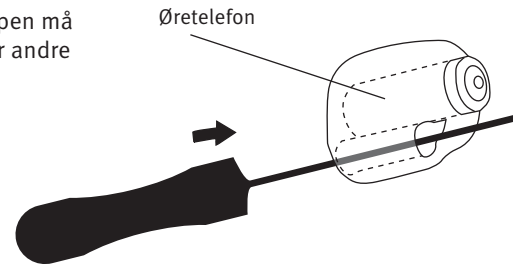

Udskiftning af WaxStop voksfilter


Brug værktøjet, som følger med WaxStop-æsken.

1. Værktøjet har to fingre, en med et nyt voksfilter (A) og en som fjerner det gamle filter (B).
2. Sæt filterfjernereren ind i lydudgangen på Micro øreproppen.
3. Træk langsomt det brugte voksfilter ud, mens du holder værktøjet lige.
4. Drej værktøjet 180°.
5. Pres det nye filter ind i lydudgangen og fjern forsigtigt værktøjet.
6. Smid det brugte værktøj ud. Det kan ikke genbruges.

Voksfilteret skal udskiftes:

- Når du kan se, at filteret i Micro øreproppen er tilstoppet.
- Når høreapparatet ikke lyder normalt.

Brug kun WaxStop voksfilter!

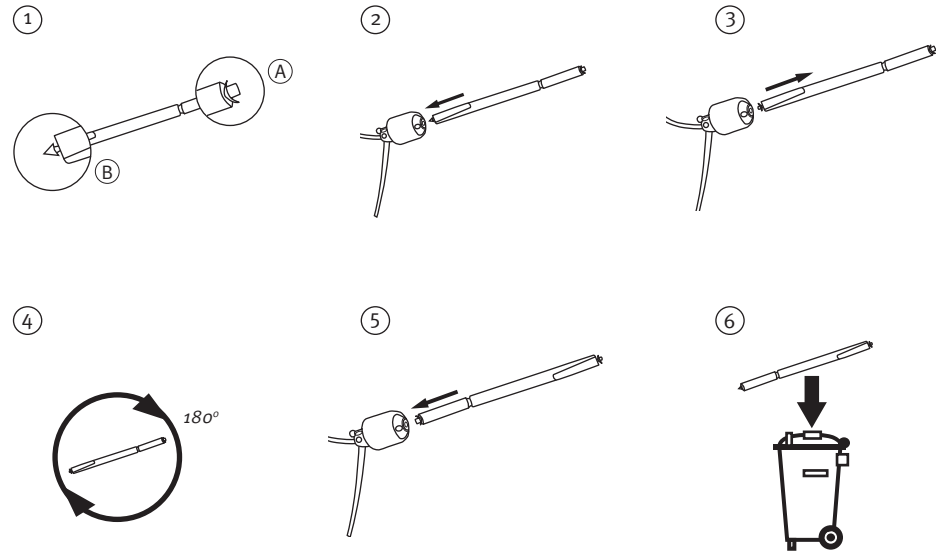


Tipper – Daglig vedligeholdelse

Rengør øretelefonen dagligt. Brug kluden og tør eventuelt ørevoks af.

Når du har brug for en frisk, ren tip, tager du den eksisterende af og sætter en ny på.

Tippen udskiftes efter behov ca. en gang om måneden, eller som angivet af din høreapparattilpasser.

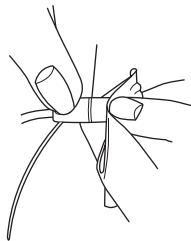




30

Udskiftning af tip

Tippen er nem at udskifte.

Tag fat i den bredeste del af tippen og træk den af slangen. Placér den nye tip på øretelefonen og tjek, at den sidder ordentlig fast.

Under tippen vil du se et hvidt voksfilter monteret for enden af øretelefonen. Det er et filter, som vil sørge for, at snavs og ørevoks ikke beskadiger øretelefonen. Kontakt din høreklub for at få filteret set efter og udskiftet, hvis det bliver tilstoppet.

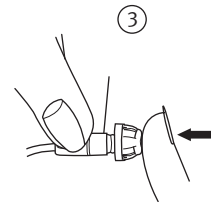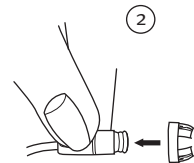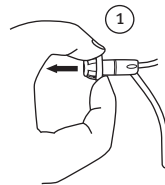

31

VIGTIGT!

Tippen er lavet af et blødt, medicinsk godkendt gummimateriale. Det er ikke farligt, hvis tippen falder af i øregangen. Tag den forsigtigt ud, hvis du kan. Lad om nødvendigt en anden person hjælpe dig. Undgå at skubbe tippen længere ind i øregangen. Skub ikke øretelefonen ind i øret igen, før tippen er fjernet fra øret. Kontakt din høreklub, hvis du føler dig usikker.

Undgå varme, fugt og kemikalier

Dine høreapparater må aldrig udsættes for høje temperaturer, f.eks. efterlades i en varm bil parkeret i solen. De må aldrig udsættes for fugt i f.eks. dampbad, brusebad eller kraftig regn. De må heller ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne.

Tør omhyggeligt batteriet af, hvis det er blevet fugtigt, da fugt kan påvirke dets ydelse. Hvis du bruger et antifugtkit, kan det hjælpe med at undgå problemer med fugt og endda forlænge dit høreapparats liv. Spørg din høreapparattilpasser til råds.

Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge dine høreapparater. Du bør derfor altid tage høreapparaterne af, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager dine høreapparater på igen. Hvis du bruger lotion, så sørg for at tørre hænderne godt, inden du tager dine høreapparater på.

Syv nemme trin til bedre høreelse

Det tager tid at vænne sig til et nyt høreapparat. Hvor lang tid, det tager, varierer fra person til person. Det afhænger af mange faktorer, som f.eks. tidligere brug af høreapparat og graden af dit høretab.

1. I ro og mag derhjemme

Prøv at vænne dig til alle de nye lyde. Lyt til de mange baggrundslyde og forsøg at identificere hver enkelt lyd. Husk, at nogle lyde vil lyde meget anderledes i forhold til, hvad du er vant til. Du vil måske være nødt til at lære at genkende dem igen. Du vil med tiden vænne dig til lydene omkring dig – hvis ikke, skal du tage kontakt til din høreapparattilpasser.

Hvis du bliver træt af at bruge høreapparaterne, så tag dem af et stykke tid og hold en pause. Du vil gradvist vænne dig til at bruge dem i længere tid. Snart vil du uden problemer kunne bruge høreapparaterne hele dagen.

2. Samtale med en enkelt person

Sid sammen med en enkelt person et sted uden baggrundsstøj. Sid over for hinanden, så du tydeligt kan se den anden persons ansigtsudtryk. Du kan opleve nye talelyde, som kan virke generende til at begynde med. Når hjernen har vænnet sig til de nye talelyde, vil du dog opfatte tale tydeligere.

3. Lyt til radio eller fjernsyn

Lyt først til nyhedsoplæsere, da de som regel taler meget tydeligt. Prøv derefter andre tv-programmer.

Hvis du synes, det er svært at lytte til radio eller fjernsyn, kan din høreapparattilpasser rådgive dig omkring høretekniske hjælpemidler, som forbedrer lytteforholdene i disse situationer.

4. Samtale i en gruppe

En samtale med mange mennesker vil ofte indebære en større grad af baggrundsstøj, hvilket gør det vanskeligere at høre, hvad der bliver sagt. I disse situationer skal du rette din opmærksomhed mod den person, du ønsker at lytte til. Hvis du går glip af et ord eller en sammenhæng, så bed om at få gentaget, hvad der blev sagt.


5. Brug af telespole i biografen, i teatret eller i kirken

Flere og flere kirker, teatre og andre offentlige lokaler får installeret teleslyngeanlæg. Anlægget udsender trådløse signaler, som opfanges af høreapparatets telespole. Et skilt viser almindeligvis, hvor der er installeret teleslynge. Bed din høreapparat-tilpasser om yderligere information.

6. Brug af telefon

Hold telefonrøret en smule skråt på kinden for at få lyden til at gå direkte ind i høreapparatets mikrofonåbning. Dette gør, at høreapparatet ikke hylér og giver dig bedst mulige betingelser for at forstå samtalen. Når du holder telefonrøret på denne måde, skal du huske at tale direkte ind i mikrofonen på telefonrøret, så personen "i den anden ende" kan høre dig.

Alle RITE-høreapparater har telespole, og hvis din telefon er udstyret med telespole, kan du skifte til telespoleprogrammet for at forbedre lydmodtagelsen yderligere.

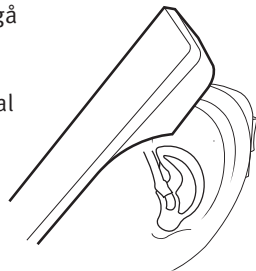

Husk, at telespolen i høreapparatet kan opfange forstyrrende signaler fra elektronisk udstyr, såsom telefaxmaskiner, computere, fjernsyn eller lignende. Sørg for, at høreapparatet er placeret 2-3 meter fra sådant udstyr, når du bruger telespoleprogrammet.

7. Trådløst og mobiltelefoner

Dit høreapparat er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Det er dog ikke alle mobiltelefoner, som er høreapparatkompatible. Forstyrrelser af forskellig grad kan skyldes typen af mobiltelefon.

Hvis du synes, at det er vanskeligt at opnå gode resultater ved brug af mobiltelefonen, kan din høreapparat-tilpasser rådgive dig omkring høretekniske hjælpemidler, som kan forbedre lytteforholdene i disse situationer.

Brug dine høreapparater hele dagen

Det bedste, du kan gøre for at opnå bedre hørelse, er at øve dig i at lytte med høreapparaterne, indtil du uden besvær kan bruge dem hele dagen. I de fleste tilfælde får du ikke det fulde udbytte af din hørelse, hvis du kun bruger høreapparaterne en gang imellem.

Høreapparaterne giver dig ikke en normal hørelse tilbage. De kan heller ikke forhindre eller forbedre et høretab som følge af en fysiologisk tilstand. Det, de kan gøre for dig, er at hjælpe dig til at bruge den hørelse, du har, bedre. Hvis du har to høreapparater, er det vigtigt altid at bruge begge.

De vigtigste fordele ved at bruge to høreapparater er:

- Din evne til at lokalisere lyde forbedres.
- Det bliver nemmere at forstå tale i støjfyldte omgivelser.
- Du vil opleve et mere komplet, mere behageligt lydbillede.

Almindelige problemer og løsningsforslag		
Symptom	Mulig årsag	Løsning
Ingen lyd	Batteriet er brugt op	Udskift batteriet s. 6
	Tilstoppet lydudgang	Rengør Micro øreproppen eller tippen s. 27 & 30
		Udskift evt. voksfilteret eller tippen s. 28 & 31
Svigtende eller svagere lyd	Tilstoppet lydudgang	Rengør Micro øreproppen eller tippen s. 27 & 30
	Fugt	Tør batteriet og høreapparatet af med en tør klud s. 33
	Batteriet er brugt op	Udskift batteriet s. 6
Pivende støj	Høreapparatet sidder ikke korrekt i øret	Prøv at sætte høreapparatet i igen s. 10
	Ørevoks i øregangen	Konsultér din ørelæge

Hvis ovenstående løsningsforslag ikke løser problemet, bør du kontakte din høreklub.

International garanti

Dine høreapparater har en begrænset produktgaranti omfattende materiale- og produktionsfejl i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker selve høreapparatet, men ikke tilbehør som batterier, slanger, voksfiltre osv.

Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af uautoriseret tredjepart, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparaterne.

Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstående. Se den aktuelle garantiperiode på garantibeviset.

Service

Tag kontakt til din høreapparattilpasser, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer.

Oticons servicecenter:

Oticon A/S

Tilstedvej 73 • 7700 Thisted

Telefon: 39 17 71 00 eller 39 13 89 15

Garantibevis

Brugerens navn:

Høreapparatilpasser:

Klinikkens adresse:

Klinikkens tlf. nr.:

Leveringsdato:

Garantiperiode:

Måned:

Model venstre:

Serienr.:

Model højre:

Serienr.:

Batteristørrelse: 312

Produktgodkendelse, forholdsregler og mærkninger

Høreapparatet indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,84 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10m}$.

Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er høreapparatets stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra f.eks. halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. Høreapparatet overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve høreapparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

Høreapparatet indeholder et modul med mærkningen:



ID: U28FUBTE01

IC: I350B-FUBTE01

Apparatet er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.

Brug af udstyret er underlagt følgende to betingelser:

1. apparatet må ikke forårsage skadelig interferens
2. apparatet skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere FCC's autorisation til at bruge dette apparat.

908 68 80100 / 03.09

Advarsler

Det kan være farligt at sluge eller på anden måde bruge høreapparater og batterier forkert. Forkert brug kan føre til alvorlige skader, permanent høretab eller i yderste konsekvens være livsfarligt.

Før du tager dine høreapparater i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning.

- Høreapparater, deres komponenter og batterier er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv.
- Skift aldrig batterier og justér aldrig kontrollerne på høreapparaterne, mens babyer, små børn eller personer med mentale handicap ser på det.
- Bortskaf brugte batterier på et sted, så de ikke er tilgængelige for babyer, små børn eller personer med mentale handicap.
- Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du sluger piller.
- Tag under ingen omstændigheder høreapparater eller batterier i munden. De er glatte og kan let sluges ved et uheld.

- De fleste høreapparater kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales, hvis høreapparaterne skal bruges af små børn eller mentalt handicappede.

Søg straks læge, hvis du kommer til at sluge et batteri eller høreapparat.

Brug af høreapparaterne

- Dine høreapparater må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, du har fået hos din høreapparattilpasser. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab.
- Lad aldrig andre bruge dine høreapparater, da de kan bruges forkert og for altid ødelægge hørelsen hos den, som har lånt dem.

Brug af batterier

- Brug kun de batterier, din høreapparattilpasser har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden.
- Forsøg ikke at genoplade almindelige batterier. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.
- Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.

Høreapparaterne fungerer ikke

- Høreapparater kan holde op med at virke, for eksempel hvis batterierne er brugt op, eller hvis lydudgangen/voksfilteret er tilstoppet af fugt eller ørevoks. Du skal være opmærksom på dette, specielt når du er ude i trafikken eller på anden måde afhængig af advarende lyde.

Forstyrrelser

- Dine høreapparater er blevet grundigt testet for forstyrrelser, i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Men den teknologiske udvikling betyder, at der konstant introduceres nye produkter på markedet, og nogle af dem kan udsende elektromagnetisk stråling, som kan give uforudsete forstyrrelser i høreapparaterne. Det kan eksempelvis være induktionskogeplader, butiksalarmen, mobiltelefoner, telefaxmaskiner, computere, røntgen, CT-skanning osv.
- Dine høreapparater er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Men andet medicinsk udstyr kan dog give forstyrrelser i høreapparaterne. Denne form for forstyrrelser skyldes radiosignaler, forstyrrelser i elektriske luftledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr og elektro-statisk afladning.

Mulige bivirkninger

- Høreapparater kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks (cerumen).
- I yderst sjældne tilfælde kan materialer i høreapparaterne, som ellers ikke er allergene, irritere huden.

Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

Sikkerhedskrav vedrørende Direkte Audio Indgang (DAI)

- Sikkerheden i et høreapparat med DAI (Direkte Audio Indgang) afhænger af den eksterne lydkilde. Når DAI er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat overholde kravene i IEC-60065, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Voksfilter

- Se altid dine høreapparater grundigt efter for at sikre, at der ikke er et mellemrum mellem voksfilteret og Micro øreproppen.

Kontakt din høreklinik, hvis du er usikker på brug eller udskiftning af voksfilteret.

908 68 80100 / 03.09

Oticon erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet wwEC. Overensstemmelseserklæring fås hos:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.dk

908 68 80100 / 03.09

CE 0543 0682



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



NI175



94802201000001

oticon
PEOPLE FIRST