

BRUGSANVISNING

BTE



Tillykke

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed og med minimum af vedligeholdelse.

Denne brugsanvisning vil hjælpe dig til at opleve de mange fordele ved høreapparater og sikre, at du får det fulde udbytte af dem.

Indhold

BTE 13 og BTE Power	5a
BTE 13 med Corda ²	5b
Udskiftning af batteri	7
Tænd og sluk	9
Indikation af venstre/højre høreapparat	10
Sådan tager du dit høreapparat med øreprop på	11
Sådan tager du dit høreapparat med Corda ² (tyndslange) på	12
Volumenkontrol (option)	17
Standby (option)	18
Børnesikret batteriskuffe (option)	20
Telespole (option)	23
Autotelefon (option)	24
FM	28
Daglig vedligeholdelse af dine høreapparater	30
Sådan udskiftes Corda ² (tyndslange)	35
Rengøring af dit høreapparat med Corda ² (tyndslange)	36

Daglig vedligeholdelse af Corda ² -tipper	37
Udskiftning af Corda ² -tipper	38
Brugen af dine høreapparater	41
Almindelige problemer og løsningsforslag	46
Advarsler	55


VIGTIGT!

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at bruge dine høreapparater. Den indeholder forklaringer og vigtige informationer om brugen og vedligeholdelsen af dine høreapparater og batterier.

ADVARSEL

BTE Power-udgaven er et kraftigt høreapparat. Lad aldrig andre bruge dine høreapparater. Forkert brug kan medføre varig skade på deres hørelse.


BTE 13 og BTE Power

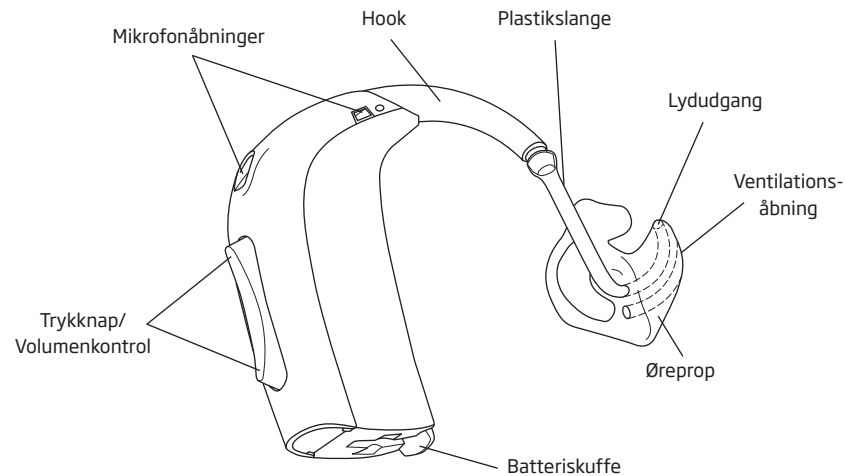


Batteristørrelse: 13

BTE 13 med Corda²


Din tip/øreprop:

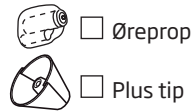

Åben tip:

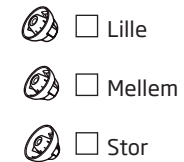

Batteristørrelse: 13

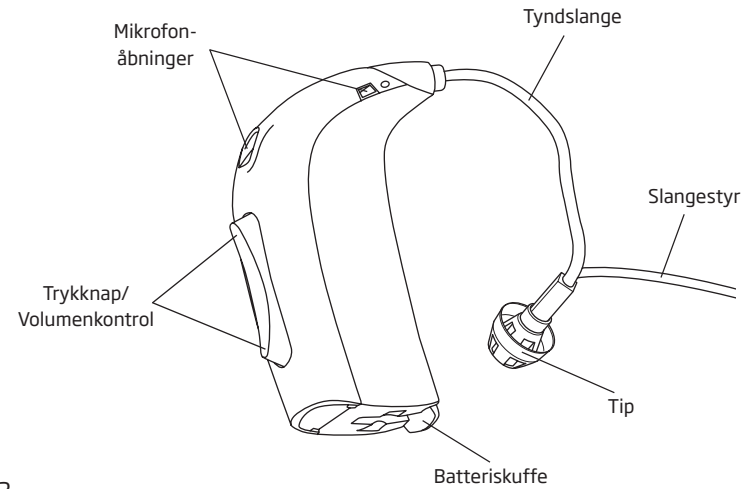

5b

Udskiftning af batteri



Dine høreapparater bruger batterier af størrelse 13. Brug kun batterier, som du får anbefalet af din høreapparattilpasser.

Et opbrugt batteri bør fjernes omgående og afleveres der, hvor du normalt afleverer batterier.

Når batteriet er ved at være opbrugt, høres 2 bip. Dette forvarsel starter, når batteriet kun har nogle få timer tilbage. Forvarslet vil blive gentaget med rimelige mellemrum for at indikere, at det er tid til at udskifte batteriet.

Hvis batteriet løber ud, slukkes apparatet. Når det sker, høres 4 bip for at indikere, at apparatet ikke længere er tændt.

Det betyder ikke, at der er noget galt med høreapparatet.

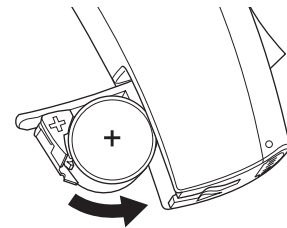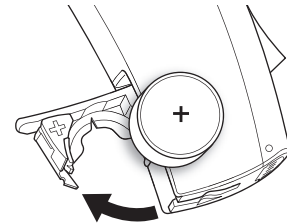


Følg vejledningen nedenfor, når du udskifter batteriet:

- Åbn batteriskuffen helt ved at trykke på den fremspringende kant i bunden af apparatet. Fjern det gamle batteri.
- Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri.
- Isæt det nye batteri, så + mærket vender samme vej som + mærket trykt i batteriskuffen. Luk batteriskuffen.

Eventuel fugt på batteriet skal tørres af før brug.

Når du skifter batteri, kan det tage et par sekunder, inden batteriet virker med fuld effekt.

Magneten for enden af værktøjet kan være en hjælp ved håndtering af batterierne.

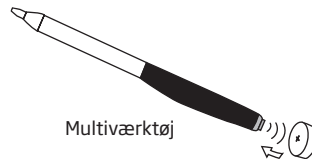


Tænd og sluk

For at tænde for høreapparatet skal du lukke batteriskuffen helt med batteriet isat. Når batteriskuffen er lukket, vil apparatet starte op med at spille en jingle. Dette betyder, at batteriet virker, og at apparatet fungerer. Denne funktion kan dog være afbrudt af din høreapparattilpasser.

For at slukke høreapparatet, skal du åbne batteriskuffen, indtil du mærker et "klik".

For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på.

VIGTIGT
Lad batteriskuffen stå helt åben, så høreapparatet kan lufttørre, når du ikke bruger det.

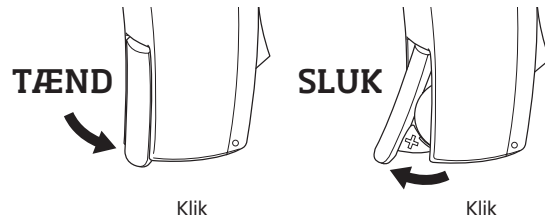


Indikation af venstre/højre høreapparat

Høreapparater er tilpasset individuelt på hvert øre, hvilket betyder, at hvis du har to apparater, så er dit venstre høreapparat sandsynligvis programmeret anderledes end det højre. Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem venstre og højre høreapparat.

For nemt at kunne identificere, om der er tale om høreapparatet til venstre eller højre øre, kan batteriskuffen forsynes med farvemarkering.

Blå markering angiver VENSTRE høreapparat.
Rød markering angiver HØJRE høreapparat.



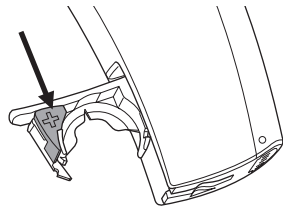


Sådan tager du dit høreapparat med øreprop på

Anbring spidsen af øreproppen i øregangen, drej en anelse og sørg for, at den øverste del af øreproppen (A) er skubbet ind bag og under folden (B) i øret.

Træk let i øret og tryk øreproppen ind mod øregangen.



Når øreproppen sidder korrekt i øret, skal du placere høreapparatet bag øret ved at løfte apparatet over øret, så det falder på plads bag øret.

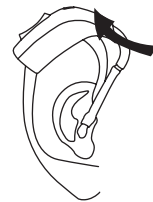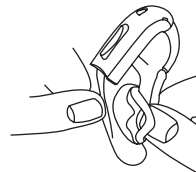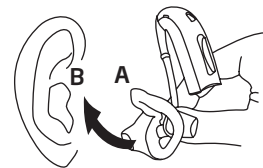

Sådan tager du dit høreapparat med Corda² (tyndslange) på

Det kræver øvelse at tage høreapparater med tyndslange på korrekt:


1. Placér høreapparatet bag øret.
2. Hold slangen, hvor den bøjer, mellem tommel- og pegefinger. Tippen skal vende ind mod øregangen. Tryk forsigtigt tippen på plads i øregangen, så slangen sidder ind til øret.
3. Placér slangestyret i concha ved hjælp af pegefingeren. Kig i spejlet. Hvis lydslangen stikker ud af øret, sidder tippen ikke ordentligt. Hvis slangestyret stikker synligt ud af øret, sidder det ikke korrekt. Træk i slangen, hvor den bøjer, for at tage høreapparatet af igen.

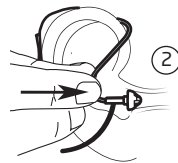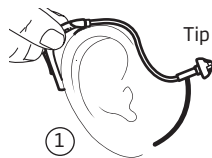

Trykknop

Dine høreapparater har en ergonomisk designet trykknop, så du kan justere lydstyrken og skifte mellem de forskellige programmer.

Du kan aktivere trykknappen ved at trykke på enten den øvre del (OP) eller nedre del (NED).

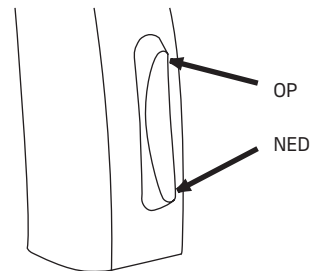

Trykknappen på dit høreapparat kan programmeres til en af 3 funktioner.

Venstre	Højre	
		Programskift: Tryk kort for at skifte program.
		Volumenkontrol: Tryk kort for at justere lydstyrken.
		Både volumenkontrol og programskift: Tryk kort for at justere lydstyrken og langt (cirka 2 sekunder) for at skifte program.

Binaural koordinering er slået til (se "Brug af 2 høreapparater").





Udfyldes af din høreapparattilpasser!

Programmer (option)



Dit høreapparat kan have op til 4 forskellige programmer.

Dine høreapparater bipper, når du skifter mellem de forskellige programmer. Antallet af biptoner indikerer, hvilket program du bruger.

	Et bip, når du skifter til program 1
	To bip, når du skifter til program 2
	Tre bip, når du skifter til program 3
	Fire bip, når du skifter til program 4

Tryk øverst på knappen for at gå frem i programlisten fx fra P1-P2.
Tryk nederst på knappen for at gå tilbage i programlisten fx fra P3-P2.

Nedenfor kan du se en beskrivelse af de programmer, som findes i dit høreapparat.

Prg. 1: _____

Prg. 2: _____

Prg. 3: _____

Prg. 4: _____

Brug af 2 høreapparater

Hvis du har to Ino Pro høreapparater, kan trykknappen på det ene høreapparat programmeres, så det skifter program i begge høreapparater (binaural koordinering). Det betyder, at når du skifter program i det ene høreapparat, skifter det automatisk også i det andet.

Volumenkontrol (option)



En brugerbetjent volumenkontrol kan aktiveres. Volumenkontrollen giver dig mulighed for at justere lydstyrken i særlige lyttesituationer til et niveau, der føles behageligt.

Tryk kortvarigt på den øvre del af trykknappen for at **ØGE** volumen.

Tryk kortvarigt på den nedre del af trykknappen for at **MINDSKE** volumen.

Du vil høre en biptone, når du skruer op eller ned for lydstyrken.

Når høreapparatet tændes, starter det på det foretrukne lydstyrkeniveau.

Når volumenkontrollen justeres til det foretrukne niveau, indikeres det med et bip.

Brug af 2 høreapparater

Hvis du har to Ino Pro høreapparater, kan trykknappen på det ene høreapparat programmeres, så volumen justeres i begge høreapparater (binaural koordinering). Det betyder, at når du justerer på volumenkontrollen på det ene høreapparat, justeres niveauet automatisk også i det andet.

Standby (option)




Hvis du holder trykknappen inde i minimum 3 sekunder, bliver høreapparatet sat på standby.

Tryk kort på knappen for at aktivere høreapparatet igen.

Brug standby-funktionen, hvis du ønsker at afbryde høreapparatet midlertidigt, imens du har det på.

Bemærk: du kan trykke enten op eller ned for at sætte høreapparatet på standby.

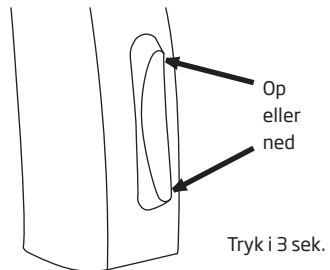

VIGTIGT



Brug ikke standby-funktionen som sluk-funktion, da høreapparatet i denne indstilling stadig trækker strøm fra batteriet.

Børnesikret batteriskuffe (option)

Det anbefales at bruge en børnesikret batteriskuffe for at undgå utilsigtet brug af denne og af batteriet. Dette anbefales til babyer, mindre børn eller mentalt handicappede.


Sådan låses batteriskuffen: Sørg for at batteriskuffen er lukket helt. Brug en lille skruetrækker til at dreje den børnesikrede skrue til låst position.

Sådan låses batteriskuffen op: Brug en lille skruetrækker til at dreje den børnesikrede skrue til åben position.

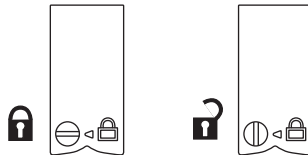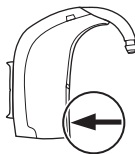

Sådan åbnes batteriskuffen.

Batteriskuffen må kun åbnes ved hjælp af et værktøj. Brug en lille skruetrækker til at åbne døren ved at anbringe den i rillen i bunden af høreapparatet, og trykke på skuffen til den åbnes.

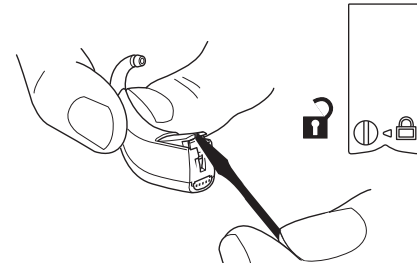

VIGTIGT

Sørg for at låsen er i dens åbne position, før batteriskuffen åbnes. Ved at bruge kraft kan batteriskuffen beskadiges og gøre, at børnesikringen ikke længere fungerer optimalt. Kontakt din høreapparatilpasser, hvis du mener, at batteriskuffen er beskadiget. Tving ikke batteriskuffen forbi dens helt åbne position. Sørg for at isætte batteriet korrekt.

Telespole (option)



Telespolen modtager lyd transmitteret fra en teleslynge. Telespolen bruges ved telefonsamtaler og til teleslyngeanlæg i f.eks. teatret, kirken eller ved forelæsninger.

Du aktiverer telespolen ved hjælp af trykknappen, ligesom når der skiftes mellem programmer. Når telespolen er aktiveret, hører du et antal biptoner svarende til telespoleprogrammet.


Se, hvor telespoleprogrammet er placeret, i afsnittet "Programmer".

Autotelefon (option)

Høreapparatet kan have en indbygget autotelefonfunktion. Autotelefonprogrammet aktiveres automatisk, når høreapparatet befinder sig tæt ved en telefon. Når telefonprogrammet aktiveres, hører du et antal biptoner.

Når du afslutter telefonsamtalen, vil høreapparatet automatisk vende tilbage til det foregående program.

Ikke alle telefoner kan aktivere autotelefonen. Telefonen skal have en særlig magnet monteret. Følg venligst den separate vejledning i montering af magneten, som fås hos din høreapparattilpasser.

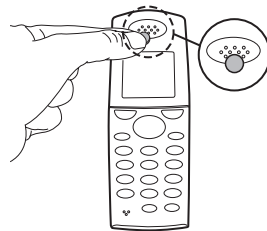

ADVARSEL

Hvis du bruger en autotelefon-magnet:

- Magneten skal holdes uden for rækkevidde af børn og dyr. Søg omgående læge, hvis nogen kommer til at sluge en magnet.
- Hav ikke magneten i brystlommen, og hav den altid min. 30 cm fra aktive implantater. Vi anbefaler, at telefonen med magnet holdes på modsat side, hvis du har en pacemaker eller andet aktivt implantat.
- Hold magneten på min. 30 cm afstand fra kreditkort og andet, som er følsomt over for magnetisme.

DAI (Direkte Audio Indgang)


Hvis dit høreapparat ved hjælp af en DAI-sko er tilsluttet en ekstern lydkilde, fx en mp3-afspiller, mikrofon el.lignende, vil signalerne fra disse kilder blive ført direkte ind i dit høreapparat.

Montering af DAI-sko

Begynd med at åbne batteriskuffen og klik så DAI-skoen på høreapparatet.

Sæt derefter DAI-ledningen i sko.

Når DAI-skoen er tilsluttet, skifter høreapparatet automatisk til en kombination af et DAI-program og høreapparatets mikrofon.

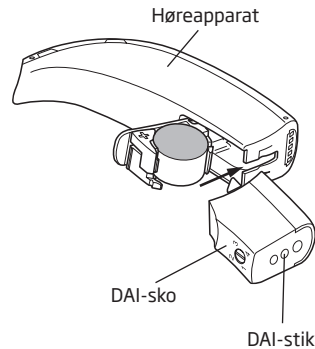

Hvis du kun ønsker DAI-programmet, kan du skifte til næste program ved hjælp af trykknappen.

De to nye programmer bliver automatisk placeret efter standardprogrammerne, som din høreapparattilpasser har indstillet i høreapparatet.

VIGTIGT

Når DAI er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat opfylde kravene i IEC-60065, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

FM


En FM-modtager gør det muligt at modtage signaler fra en trådløs FM-sender direkte i høreapparatet.

Montering af FM-modtager

Begynd med at åbne batteriskuffen. Klik FM-modtageren på høreapparatet.

Så længe FM-modtageren er tilsluttet til høreapparatet, bliver to programmer automatisk tilføjet efter standardprogrammerne, som din høreapparattilpasser har indstillet i høreapparatet.


Når FM-modtageren er tilsluttet og den røde lampe lyser, skifter høreapparatet automatisk til et program, som modtager signaler fra både mikrofonen og en trådløs FM-sender.

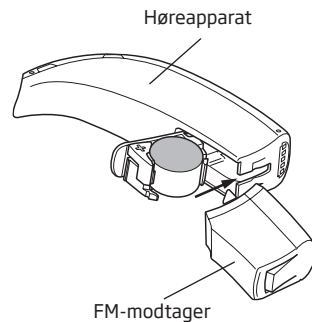

Hvis du ønsker at modtage input fra FM-senderen alene, skal du skifte til næste program ved hjælp af trykknappen.

Når FM-skoen er monteret kan du, når som helst skifte mellem standardprogrammerne og FM-programmerne ved hjælp af trykknappen.

For detaljerede instruktioner i håndtering og brug af FM-modtagerne henviser vi til brugsanvisningen som følger med disse.

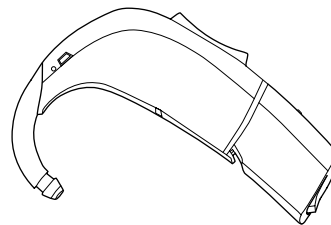

Daglig vedligeholdelse af dine høreapparater

Øregangen producerer ørevoks (cerumen), som kan tilstoppe øreproppens lydudgang eller ventilationsåbning. For at forhindre, at der samler sig ørevoks, som ændrer høreapparatets ydelse, skal du følge instruktionerne i dette afsnit.

Når du rengør høreapparaterne, skal du holde dem over en blød overflade, hvis du skulle tabe dem.

Inden du går i seng:


- Sørg for, at der ikke sidder ørevoks i øreproppens åbninger, da voksen kan forringe apparatets ydeevne.
- Åbn batteriskuffen, så høreapparatet kan lufttørre indvendig.

Rengøring af høreapparatet

Multiværktøjet indeholder en børste til rengøring af dine høreapparater.

Denne skal bruges for at sikre den bedste pleje og ydelse af høreapparaterne.

Multiværktøj

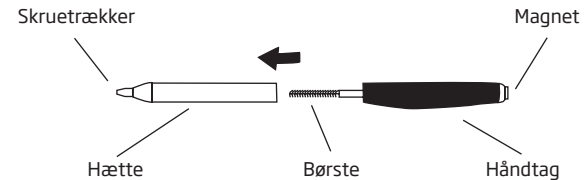


Vedligeholdelse

- Fjern evt. ørevoks som sidder omkring lydudgangen ved hjælp af børsten.
- Rengør ventilations-åbningen ved at trykke børsten gennem hullet og samtidig dreje det en anelse.

Brug en tør klud til at tørre høreapparatets overflade af.

Udskift børsten efter behov. Træk den ud af håndtaget og sæt en ny, frisk børste i. Tryk den nye børste fast ind i håndtaget.



Kontakt din høreklub for information om, hvor du kan få flere børster.

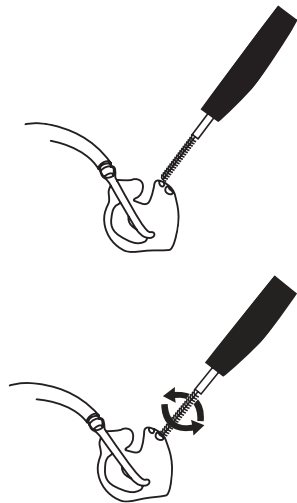


Rengøring af ørepropper

Ørepropperne bør vaskes regelmæssigt:

- Adskil høreapparaterne og ørepropperne ved at trække slangen af hooken.
- Vask øreproppen i lunkent vand tilsat mild sæbe. Brug aldrig stærke rensedmidler.
- Skyl med vand.
- Tør øreproppen.
- Eventuelle vanddråber i øreproppen eller slangen skal blæses ud. Du kan købe en særlig luftpuster til dette formål hos din høreapparattilpasser.

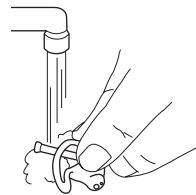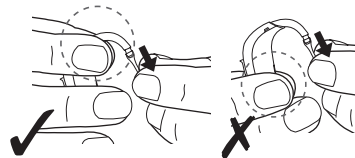

- Øreproppen og slangen skal være helt tørre, inden du sætter dem på høreapparatet igen. Sørg for, at venstre øreprop og slange sættes på høreapparatet med indikation for venstre øre, og ligeså for højre høreapparat.

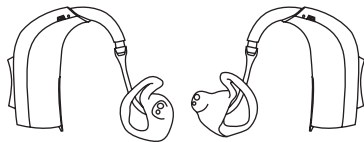

Udskiftning af plastikslinge




Plastikslingen i øreproppen skal udskiftes, når den bliver gul eller stiv. Kontakt din høreapparattilpasser.

VIGTIGT!

Selve høreapparatet må aldrig vaskes eller kommes i vand eller andre væsker!

Sådan udskiftes Corda² (tyndslange)


1. Træk slangen af høreapparatet.
2. Sæt slangen på høreapparatet.
3. Korrekt.

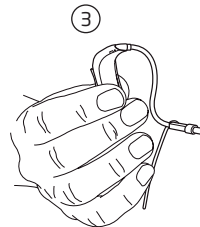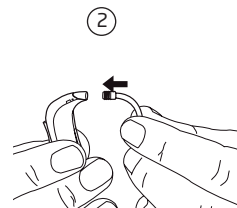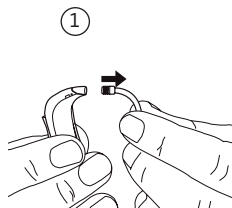

Rengøring af dit høreapparat med Corda² (tyndslange)

Sådan fjernes cerumen fra den tynde slange:

- Træk slangen af høreapparatet.
- Træk rengøringsværktøjet igennem slangen.
- Fjern værktøjet og tryk slangen fast på høreapparatet igen.

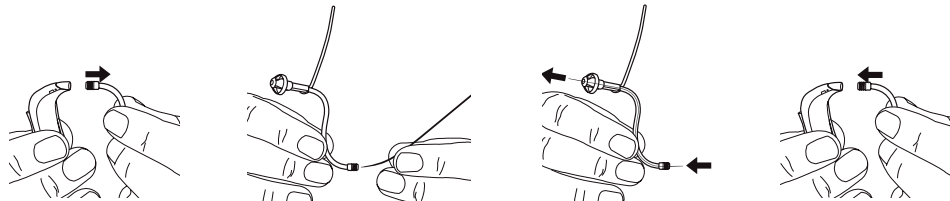


Daglig vedligeholdelse af Corda²-tipper

Rengør tippet dagligt. Brug kluden og tør eventuelt ørevoks af. Når du har brug for en frisk, ren tip, tager du den eksisterende af og sætter en ny på.

Tippet udskiftes efter behov ca. en gang om måneden, eller som angivet af din høreapparattilpasser.

Udskiftning af Corda²-tipper

Tippen er nem at udskifte. Hold på den bredeste del af tippen og træk den af tilslutningen på slangen. Sæt den nye tip på og kontrollér, at den sidder fast.

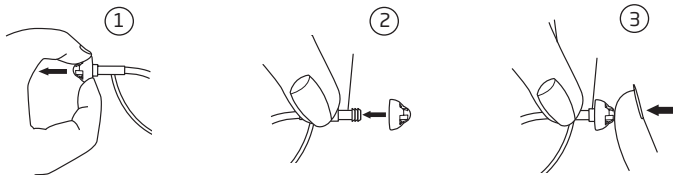

VIGTIGT!

Tippen er lavet af et blødt, medicinsk godkendt gummimateriale. Det er ikke farligt, hvis tippen falder af i øregangen. Tag den forsigtigt ud, hvis du kan. Lad om nødvendigt en anden person hjælpe dig. Undgå at skubbe tippen længere ind i øregangen. Tryk ikke slangen ind i øret igen, før tippen er fjernet fra øregangen. Kontakt din høreklinik, hvis du er i tvivl.

VIGTIGT!

- Brug kun originale dele til dine høreapparater.
- Rengøringsværktøjet skal kun bruges til rengøring af slangen, når den er taget af høreapparatet, og ikke imens høreapparatet sidder på øret.
- Tjek, at tippen sidder ordentlig fast på lydslangen, inden den sættes ind i øret.
- Hvis tippen ikke sidder ordentlig fast og falder af inde i øret: Hvis du ikke selv kan få den ud, kontakt da din høreklinik eller din læge.
- Slangen må ikke bruges uden tip.
- Forebyggende pleje og vedligeholdelse vil sikre, at høreapparaterne fungerer, som de skal. Rengør lydslangen regelmæssigt.
- Lad ikke andre bruge dine høreapparater eller dele dertil.
- Sørg for, at dine hænder er rene, inden du rører ved høreapparaterne.

Undgå varme, fugt og kemikalier

Dine høreapparater må aldrig udsættes for høje temperaturer, f.eks. efterlades i en varm bil parkeret i solen. De må aldrig udsættes for fugt i f.eks. dampbad, brusebad eller kraftig regn. De må heller ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne.

Tør omhyggeligt batteriet af, hvis det er blevet fugtigt, da fugt kan påvirke dets ydelse. Hvis du bruger et antifugtkit, kan det hjælpe med at undgå problemer med fugt og endda forlænge dit høreapparats liv. Spørg din høreapparattilpasser til råds.

Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge dine høreapparater. Du bør altid tage høreapparaterne af, inden du bruger denne slags produkter og lad dem tørre, inden du tager høreapparaterne på igen. Hvis du bruger lotion, skal du tørre hænderne godt af, inden du rører ved høreapparaterne.

Brugen af dine høreapparater

Det tager tid at vænne sig til et nyt høreapparat. Hvor lang tid, det tager, varierer fra person til person. Det afhænger af mange faktorer, som f.eks. tidligere brug af høreapparat og graden af dit høretab.

Hvis du har Ino Pro høreapparater, kan de tilsluttes trådløst til eksterne lydkilder med Oticon ConnectLine Streamer. Streameren kan bruges til justere at lydstyrken, til programskift og til trådløs tilslutning med ConnectLine-tilbehør for ekstra støtte.

Syv nemme trin på din vej til bedre hørelse

1. I ro og mag derhjemme

Prøv at vænne dig til alle de nye lyde. Lyt til de mange baggrundslyde og forsøg at identificere hver enkelt lyd. Husk, at nogle lyde vil lyde meget anderledes i forhold til, hvad du er vant til. Du vil måske være nødt til at lære at genkende dem igen. Du vil med tiden vænne dig til lydene omkring dig - hvis ikke, skal du tage kontakt til din høreapparattilpasser.

Hvis du bliver træt af at bruge høreapparaterne, så tag dem af et stykke tid og hold en pause. Du vil gradvist vænne dig til at bruge dem i længere tid. Snart vil du uden problemer kunne bruge høreapparaterne hele dagen.

2. Samtale med en enkelt person

Sid sammen med en enkelt person et sted uden baggrundsstøj. Sid over for hinanden, så du tydeligt kan se den anden persons ansigtsudtryk. Du kan opleve nye talelyde, som kan virke generende til at begynde med. Når hjernen har vænnet sig til de nye talelyde, vil du dog opfatte tale tydeligere.

3. Lyt til radio eller fjernsyn

Lyt først til nyhedsoplæsere, da de som regel taler meget tydeligt. Prøv derefter andre tv-programmer. Hvis du synes, at det er vanskeligt at høre fjernsynet eller radio, kan din høreapparattilpasser give dig mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør.

4. Samtale i en gruppe


En samtale med mange mennesker vil ofte indebære en større grad af baggrundsstøj, hvilket gør det vanskeligere at høre, hvad der bliver sagt. I disse situationer skal du rette din opmærksomhed mod den person, du ønsker at lytte til. Hvis du går glip af et ord eller en sammenhæng, så bed om at få gentaget, hvad der blev sagt.

5. Brug af telespole i biografen, i teatret eller i kirken

Flere og flere kirker, teatre og andre offentlige lokaler får installeret teleslyngeanlæg. Anlægget udsender trådløse signaler, som opfanges af høreapparatets telespole. Et skilt viser almindeligvis, hvor der er installeret teleslynge. Bed din høreapparatilpasser om yderligere information.

6. Brug af telefon

Hold telefonrøret en smule skråt på kinden for at få lyden til at gå direkte ind i høreapparatets mikrofonåbning. Dette gør, at høreapparatet ikke hylér og giver dig bedst mulige betingelser for at forstå samtalen. Når du holder telefonrøret på denne måde, skal du huske at tale direkte ind i mikrofonen på telefonrøret, så personen "i den anden ende" kan høre dig.

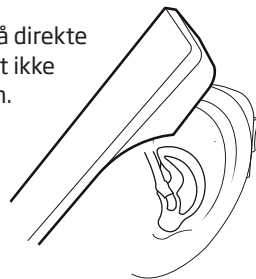

Hvis du synes, at det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt i telefonen, kan din høreapparatilpasser give dig mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør. Hvis dit høreapparat har telespole (og din telefon er udstyret med telespole), kan du skifte til telespoleprogrammet for at forbedre lydmodtagelsen yderligere.

Husk, at telespolen i høreapparatet kan opfange forstyrrende signaler fra elektronisk udstyr, såsom telefaxmaskiner, computere, fjernsyn eller lignende. Sørg for, at høreapparatet er placeret 2-3 meter fra sådant udstyr, når du bruger telespoleprogrammet.

7. Trådløst og mobiltelefoner

Dit høreapparat er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Det er dog ikke alle mobiltelefoner, som er høreapparatkompatible. Forstyrrelser af forskellig grad kan skyldes typen af mobiltelefon.

Hvis du synes, at det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt i mobiltelefonen, kan din høreapparatilpasser give dig mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør.

Brug dine høreapparater hele dagen

Det bedste, du kan gøre for at opnå bedre hørelse, er at øve dig i at lytte med høreapparaterne, indtil du uden besvær kan bruge dem hele dagen. I de fleste tilfælde får du ikke det fulde udbytte af din hørelse, hvis du kun bruger høreapparaterne en gang imellem.

Høreapparaterne giver dig ikke en normal hørelse tilbage. De kan heller ikke forhindre eller forbedre et høretab som følge af en fysiologisk tilstand. Det, de kan gøre for dig, er at hjælpe dig til at bruge den hørelse, du har, bedre. Hvis du har to høreapparater, er det vigtigt altid at bruge begge.

Almindelige problemer og løsningsforslag		
Problem	Mulig årsag	Løsningsforslag
Ingen lyd	Opbrugt batteri	Udskift batteriet s. 7
	Tilstoppet lydudgang	Rengør øreproppen s. 32 & 36
Svigtende eller svagere lyd	Tilstoppet lydudgang	Rengør øreproppen s. 32 & 36
	Fugt	Tør batteriet og høreapparatet af med en tør klud s. 40
	Opbrugt batteri	Udskift batteriet s. 7
	Tilstoppet dæmpningsfilter i hooken	Kontakt din høreklub
Pibende støj	Høreapparat/øreprop sidder ikke korrekt i øret	Sæt høreapparatet i igen s. 11
	Ørevoks i øregangen	Konsultér din ørelæge

Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte din høreklub.

International garanti

Dine høreapparater har en begrænset produktgaranti omfattende materiale- og produktions-fejl i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker selve høreapparatet, men ikke tilbehør som batterier, slanger, voksfiltre osv.

Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af uautoriseret tredjepart, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparaterne.

Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstående. Se den aktuelle garantiperiode på garantibeviset.

Service

Tag kontakt til din høreapparattilpasser, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer.

Oticons servicecenter:

Oticon A/S
Tilstedvej 73
7700 Thisted
Telefon: 39 17 71 00
eller 39 13 89 15

Garantibevis

Brugerens navn:

Høreapparatilpasser:

Klinikkens adresse:

Klinikkens tlf. nr.:

Leveringsdato:

Garantiperiode:

Måned:

Model venstre:

Serienr.:

Model højre:

Serienr.:

Batteristørrelse: 13

Produktgodkendelse, forholdsregler og mærkninger

Høreapparatet indeholder en radiosender (gælder ikke MIC- og CIC-apparater), der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,84 MHz. Senderens magnetiske felt-styrke er $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10m}$.

Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er høreapparatets stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra f.eks. halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. Høreapparatet overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve høreapparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

Mobiltelefoner

I henhold til ANSI C63 19 standard (ANSI C63.19-2006 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing instruments) kan kompatibiliteten af et specifikt høreapparat og mobiltelefon forudsiges ved at summere ratingen for høreapparatets immunitet og ratingen for mobiltelefonens emissioner. F.eks. ville resultatet for et høreapparat med rating 2 (M2/T2) og en mobiltelefon med rating 3 (M3/T3) give en kombineret rating på 5. Alle kombinerede ratings på mindst 5 vil give "normal brug". En kombineret rating på 6 eller højere indikerer "fremragende ydelse".

Immuniteten for dette høreapparat er M4/T2.

VIGTIGT!

Høreapparaterne fungerer forskelligt med forskellige mobiltelefoner. Det er derfor vigtigt, at du tester høreapparaterne sammen med din egen mobiltelefon, eller afprøver høreapparaterne, inden du køber en ny telefon.

Høreapparatet indeholder et modul med mærkningen:

FCC ID: U28FUBTE03

IC: I350B-FUBTE03

Apparatet er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.

Brug af udstyret er underlagt følgende to betingelser:

1. apparatet må ikke forårsage skadelig interferens
2. apparatet skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder til at bruge dette apparat.

Advarsler

Det kan være farligt at sluge eller på anden måde bruge høreapparater og batterier forkert. Forkert brug kan føre til alvorlige skader, permanent høretab eller i yderste konsekvens være livsfarligt.

Før du tager dine høreapparater i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning.

- Høreapparater, deres komponenter og batterier er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv.
- Skift aldrig batterier og justér aldrig kontrollerne på høreapparaterne, mens babyer, små børn eller personer med mentale handicap ser på det.
- Bortskaf brugte batterier på et sted, så de ikke er tilgængelige for babyer, små børn eller personer med mentale handicap.
- Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du sluger piller.
- Tag under ingen omstændigheder høreapparater eller batterier i munden. De er glatte og kan let sluges ved et uheld.

Advarsler

- De fleste høreapparater kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales, hvis høreapparaterne skal bruges af små børn eller mentalt handicappede.

Søg straks læge, hvis du kommer til at sluge et batteri eller høreapparat.

Brug af høreapparaterne

- Dine høreapparater må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, du har fået hos din høreapparattilpasser. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab.
- Lad aldrig andre bruge dine høreapparater, da de kan bruges forkert og for altid ødelægge hørelsen hos den, som har lånt dem.

Brug af batterier

- Brug kun de batterier, din høreapparattilpasser har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden.
- Forsøg ikke at genoplade almindelige batterier. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.
- Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.

Advarsler

Høreapparaterne fungerer ikke

- Høreapparater kan ophøre med at fungere, for eksempel hvis batterierne er brugt op, eller hvis lydudgangen/voksfilteret er tilstoppet af fugt eller ørevoks. Du skal være opmærksom på dette, specielt når du er ude i trafikken eller på anden måde afhængig af advarende lyde.

Interferens

- Dine høreapparater er blevet grundigt testet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Men som følge af nye, tekniske udviklinger introduceres der konstant nye produkter på markedet, og nogle af dem kan udsende elektromagnetisk stråling, som fører til uforudset interferens i høreapparaterne. Som eksempler kan nævnes induktion, walkie talkies, mobiltelefoner, fax, computerudstyr, trådløse alarmer, fjernbetjeninge o.lign i hjemmet m.fl.. Hvis du oplever interferens, skal du fjerne dig lidt fra den forstyrrende kilde.
- Dine høreapparater er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Men andet medicinsk udstyr kan dog give interferens i høreapparater. Denne form for interferens kan også skyldes radiosignaler, interferens i elektriske luftledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr og elektrostatisk afladning.

Advarsler

Aktive implantater

- Oticon tager forbehold og anbefaler, at følge samme retningslinjer som anbefales af producenten af icd-enhed og pacemaker som gives vedrørende til brugen af mobiltelefoner. Hvis du har et aktivt implantat, skal høreapparaterne holdes min. 15 cm fra dette. Dvs. de må fx ikke puttes i brystlommen.
- Hvis du har et hjerneimplantat, anbefaler vi, at du kontakter producenten for information om risiko for forstyrrelser.
- Æsken til opbevaring af høreapparatet har en indbygget magnet. Såfremt du har et implantat, fx en pacemaker eller icd, må æsken ikke placeres i brystlommen eller på anden måde tæt på implantatet.

Eksplodingsrisiko

- Høreapparatbatteriet indeholder ikke nok strøm til at forårsage ild under normale betingelser. Høreapparatet er dog ikke testet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplosionsrisiko. Vi anbefaler, at høreapparaterne ikke bruges de steder, hvor der er eksplosionsfare.

Advarsler

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi

- Tag høreapparaterne af inden fx røntgen, CT-, MR-, PET-scanning eller elektroterapi, da høreapparaterne kan tage skade af kraftig stråling.

Mulige bivirkninger

- Høreapparater kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks (cerumen).
- I yderst sjældne tilfælde kan materialer i høreapparaterne, som ellers ikke er allergene, irritere huden.

Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

Advarsler

Sikkerhedskrav vedrørende Direkte Audio Indgang (DAI)

- Sikkerheden i et høreapparat med DAI (Direkte Audio Indgang) afhænger af den eksterne lydkilde. Når DAI er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat overholde kravene i IEC-60065, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Advarsel til høreapparattilpasser og bruger

- Der skal tages særlig hensyn ved tilpasning og brug af høreapparater, hvis maksimale lydtryk overskrider 132 dB SPL (IEC 711). Der er risiko for at skade brugerens resterende hørelse.
- Æsken til opbevaring af høreapparatet har en indbygget magnet. Såfremt du har et implantat, fx en pacemaker eller icd, må æsken ikke placeres i brystlommen eller på anden måde tæt på implantatet.

110626DK / 2017.11.06

Oticon erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæring fås hos:

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
www.oticon.global

CE 0543 0682



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



N1175

110626DK / 2017.11.06

People First

Med vores People First-løfte
forpligter vi os til at forbedre
menneskers muligheder for
at kommunikere naturligt
og deltage aktivt



0000110626000001

oticon
PEOPLE FIRST